

Masque Livinguard Pro

Trois couches avec une quintuple protection.



Durable

Durable. Le masque Livinguard peut être lavé jusqu'à 30 fois sans perdre son effet protecteur. S'il est porté quotidiennement dans des conditions normales et lavé une fois par semaine, le masque peut être utilisé pendant six mois. Il remplace ainsi 210 masques jetables.

Brève description

Conçu et réalisé en Suisse par Livinguard
Fabriqué au Portugal
Composition : couche extérieure 100 % CO / couche intermédiaire 100 % PP, couche intérieure 100 % CO
Effet antibactérien sans argent ni nanoparticules
ne convient pas à un usage médical
le PHMB utilisé n'est pas cancérigène Carc.2, classification H35



Sécurisé

Sécurisé. Le masque peut être porté et réutilisé pendant une longue période avant d'être lavé, car le tissu qui recouvre le milieu filtrant détruit continuellement les micro-organismes à son contact. Cela réduit considérablement le risque de transmission à l'utilisateur et aux autres surfaces. Le masque est certifié non toxique et sûr.

Spécifications de taille


Pour déterminer votre taille, utilisez votre pouce et votre index pour former un C, comme illustré, du milieu de l'arête du nez jusqu'à juste en dessous du menton. Choisissez la distance la plus proche, mais certainement la plus élevée, à partir des mesures indiquées.



face mask size guide

Measure from the bridge of nose under eyes, until just below the chin.

Mask Size	S	M	L
cm	< 12cm	12 - 15cm	> 15cm

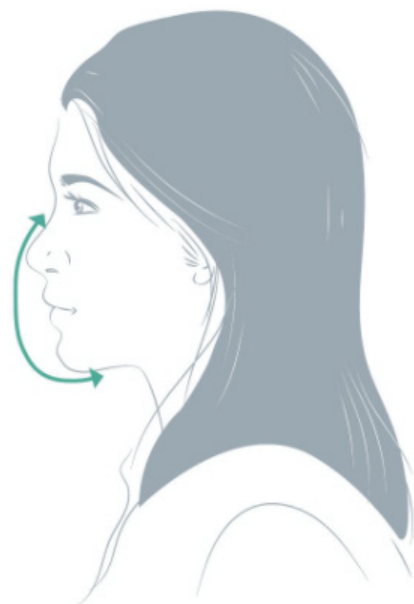

Recommandation de taille :

M pour femmes

L pour hommes


Caractéristiques

Ce masque Livinguard peut être lavé jusqu'à 30 fois et est réutilisable pendant 6 mois après la première utilisation. Ainsi, ce masque durable remplace 210 masques classiques sans perte de performance. La durabilité est limitée à 12 mois à compter de la date de production. Le tissu soyeux et inodore ainsi que les boucles auriculaires réglables et le pince-nez ajustable assurent un maintien individuel avec le plus haut niveau de confort.

Technologie Livinguard - effet antiviral confirmé :

Type de virus	Installation d'essai	Degré d'inactivation du virus
SRAS-CoV-2	Université libre de Berlin, Allemagne	99.9%
Coronavirus humain 229E	Université de l'Arizona, Tucson, États-Unis	99.5%
Influenza A	Office fédéral de la protection de la population, OFPP, Suisse	> 99.96%
fièvre jaune	Office fédéral de la protection de la population, OFPP, Suisse	> 99.97%
Bactériophage MS2	BTS, Mumbai, Inde	> 99.99%

**La technologie Livinguard
inactive de manière
scientifiquement prouvée >
99,9 % des cas de SRAS-
CoV-2.**

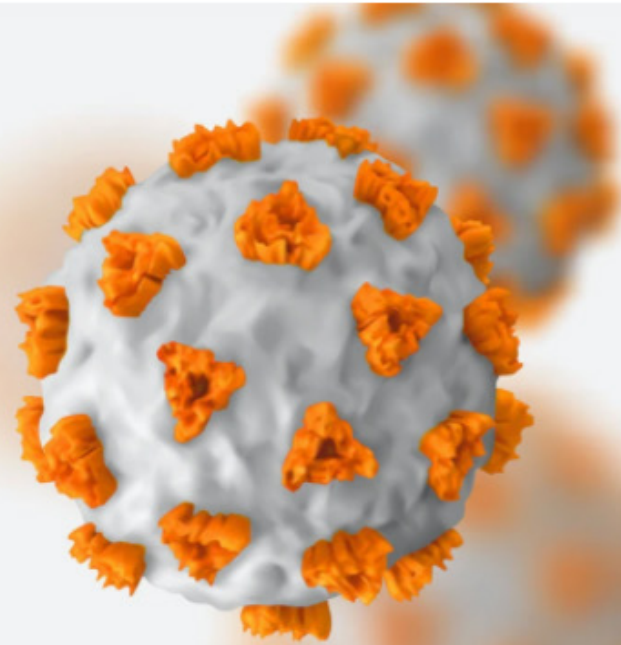

Outer layer
3 levels of protection

Middle layer
filters continuously

Inner layer
protects comfortably



3 couches avec une quintuple protection

Les trois couches se complètent en permanence dans leur effet et protègent ainsi à la fois le porteur et les autres personnes.

Manuel d'instructions

Avant l'utilisation, le porteur doit avoir lu et compris ce mode d'emploi. Conservez ces instructions afin de vous y référer ultérieurement. Le non-respect des instructions et restrictions relatives à l'utilisation de ce masque de protection, et/ou le port de ce masque pendant une fraction seulement de la durée de l'exposition, peut réduire l'efficacité de la protection respiratoire et entraîner une maladie ou la mort. Si le masque est endommagé ou sale, ou si la respiration devient difficile, veuillez immédiatement le remplacer.

Utilisation prévue :

Dans les environnements où l'air est pollué par des particules.

Toute personne cherchant à se protéger contre les irritants atmosphériques tels que le pollen, la poussière et les moisissures.

Pour les patients et les autres personnes afin de réduire le risque de propagation de l'infection, en particulier dans les situations épidémiques ou pandémiques.

Utilisation non conforme :

Ne pas utiliser par des professionnels de la santé dans un bloc opératoire ou d'autres établissements médicaux ayant des exigences similaires.

Le masque ne protège pas contre les produits chimiques, les gaz, les vapeurs, les aérosols de pétrole, les particules à base de pétrole ou les concentrations de particules extrêmement élevées.

Les personnes ayant un système respiratoire affaibli, comme par exemple les asthmatiques ou les emphysématisés, doivent consulter un médecin et effectuer un examen médical avant l'utilisation.

Utilisation correcte

Le contrôle de l'ajustement doit être effectué à chaque fois qu'un masque facial est porté. La protection est améliorée par les mesures suivantes.

Instructions :

Nettoyez vos mains avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains avant de toucher le masque.

Ouvrez le carton d'emballage et dépliez le masque facial.

Assurez-vous que chaque côté du masque n'est pas détérioré.

Tenez le masque respiratoire dans votre main pour maintenir la position sur votre visage.

Précisez quel côté du masque se trouve sur le dessus et devant.

Ajustez les boucles auriculaires de manière à ce que le

masque facial s'adapte confortablement.

Ajustez bien l'arête du masque autour de votre nez.

Pour vérifier l'étanchéité entre le masque respiratoire et le visage, placez les deux mains complètement sur le masque respiratoire et expirez fortement. Si de l'air fuit autour du nez, réajustez la barrette de l'arête nasale en suivant l'étape 7. Le masque doit couvrir la bouche, le nez et le menton du porteur.

Nettoyez vos mains avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains avant et après avoir retiré le masque, même après avoir lavé ce dernier.

Précautions et restrictions :

Ce masque n'élimine pas les maladies, les souffrances ou les infections et est destiné au grand public.

Ce masque n'est pas adapté à une utilisation en tant que masque chirurgical.

Ne portez pas de barbe ou d'autres poils sur le visage ou d'autres conditions qui empêchent une bonne étanchéité entre le visage et la surface d'étanchéité du masque.

Ne jamais remplacer, modifier, ajouter ou omettre des pièces.

Suivez attentivement les instructions de montage, l'efficacité du filtre dépend du bon montage. Utilisez votre propre masque.

Conditions de stockage et durée de conservation :

Conservez le masque dans son emballage d'origine, à l'écart des zones contaminées, de la poussière, du soleil, des températures extrêmes et des produits chimiques nocifs.

Ce masque peut être lavé jusqu'à 30 fois s'il est stocké et entretenu conformément aux directives suivantes et traité dans les conditions indiquées ci-dessous.

Durabilité :

Utilisez ce masque avant la date d'expiration indiquée sur l'emballage. Plage de température de stockage : -20 °C (-4 °F) à +60 °C (+140 °F).

Humidité relative maximale pendant le stockage : < 80 % HR

Instructions d'entretien :

Conservez-le dans un sac/une boîte propre, à l'abri de la lumière du soleil et des températures extrêmes.

Ne portez pas de masque humide ou mouillé, mais séchez-le pendant environ 10 minutes avant de le porter.

Laver sous l'eau froide courante. Sécher à 60 °C maximum dans un endroit ombragé.

N'utilisez pas de détergent ou d'eau de javel.

Ne l'essorez pas.

Ne pas le nettoyer chimiquement.

Changez de masque au plus tard après 30 lavages.

Les produits usagés doivent être éliminés comme les déchets ménagers.